

2025年11月吉日

お客様各位

ニシム電子工業株式会社
品質保証部
産業ソリューション営業部

【重要なお案内】

医用 UPS(REMiO)と接続される医療機器の起動手順の見直しと遵守のご案内

拝啓

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社製品に接続される医療機器の起動時に、医用 UPS(以下、UPS)に繰り返し過大な電流が流れることで、UPS 内部の部品にストレスを受けて故障が生じ、医療機器が停止する不具合が発生いたしました。

お客様には、UPS を安心・安全にご使用いただけるよう、下記添付資料をご参照の上、医療機器の接続方法および起動手順を遵守いただきますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

UPS と医療機器の起動手順を正しく遵守いただくことで、UPS の故障を防止し、医療機器を安全にご使用いただけます。

つきましては、添付資料「医療機器の接続方法及び起動手順」をご確認いただき、以下の対応をお願い申し上げます。

- 起動手順のご確認と配付
- 医療従事者様への操作手順の周知徹底
- 起動手順を記載したバッテリー交換シールの貼付け(UPS 本体の上面)

また、以下の資料を別途送付いたしますので、送付先ならびに必要部数をご指示いただくようお願いいたします。

- 取扱説明書(ユーザーマニュアル)
- 簡易操作マニュアル
- バッテリー交換シール

現状の取扱説明書及び簡易操作マニュアル、バッテリー交換シールについては、確実に破棄していただき、最新版での運用をお願いいたします。

誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご不明点がございましたら、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

なお、弊社でのご説明が必要な場合には、担当者が同行の上対応させていただきます。

以上


【連絡先・お問い合わせ窓口】

産業ソリューション営業部 産業グループ 電話番号:(092)482-4702

(受付時間:平日 9:00~17:00)

【医療機器の接続方法及び起動手順】

- ① REMiO に付属している電源ケーブルをコンセント(赤コンセント)に差込んで下さい。

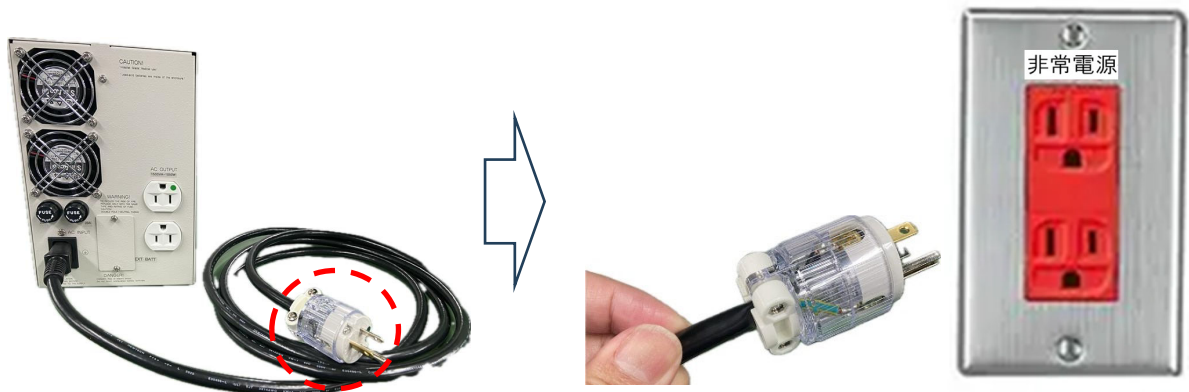

- ② 医療機器の電源ケーブルを REMiO 背面のコンセントに差込んで下さい。



上下どちらのコンセントでも構いません。

注)③前までに必ず医療機器の電源ケーブルをコンセントに差込んで下さい。

- ③ POWER ON/OFF ボタンを 3 秒間押して下さい。



3 秒間の目安は、音がなったら長押しをやめて下さい。

下記が同時に動作します。

- ・ピーツと 2 回音が鳴ります。
- ・全 LED が 2 回点滅します。

- ④ 自動的にバイパス運転になります。



BYPASS(橙)のLED が点灯している間に医療機器の電源スイッチを ON にして下さい。

- ⑤ 自動的にバイパス運転から通常運転に移行します。



- ⑥ REMiO の起動が完了します。

以上